

Примітка. Цей КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА НЕ містить усіх вказівок, як в інструкції з використання. Тому, будь ласка, зверніться до інструкції з використання для отримання повних вказівок щодо експлуатації вашого пристрою Warrior!

Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до всієї відповідної інформації (примітка: під час першого входу в систему може знадобитися авторизація) або зв'яжіться з нами за адресою info@qinflow.com




ЛІНІЙКА ВИРОБІВ WARRIOR LITE | 3 КРОКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

ПІДКЛЮЧІТЬ ТРУБКУ ДО БЛОКА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (БВІ)

1

- Перевірте, що пакет БВІ не пошкоджений або його термін придатності не минув
- Зніміть кришки Люера
- Підключіть трубку до БВІ (вхід БВІ — це коротка трубка з ПВХ); не затягуйте занадто сильно
- Дозволено використання зовнішніх пристроїв для інфузії (до 360 мм рт.ст.)

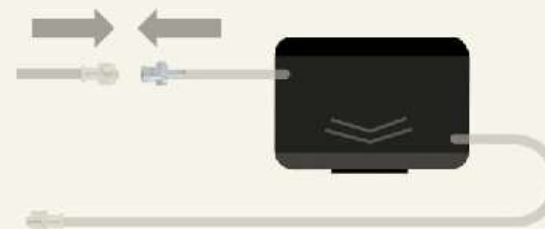

1

ЗАПОВНІТЬ ЯК ТРУБКИ, ТАК І БВІ

2

- Переконайтеся, що все повітря витіснене (об'єм заповнення — 19 мл)
- Можна заповнювати кров'ю або рідиною
- Розгляньте можливість використання пакета для натискання або ручної помпи для швидкого заповнення еритроцитами або цільною кров'ю




2

ПІДКЛЮЧІТЬ БВІ ДО БАЗОВОГО БЛОКА (або до подовжувача)

3

- Виступаючі стрілки БВІ повинні бути обернені до світлодіодної панелі
- Під час використання подовжувача вирівняйте виступаючі стрілки на БВІ та роз'ємі (тактильний напрямок).
- Система увімкнеться автоматично (або натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, розташовану на світлодіодній панелі)
- Дотримуйтесь системних вказівок на світлодіодній панелі

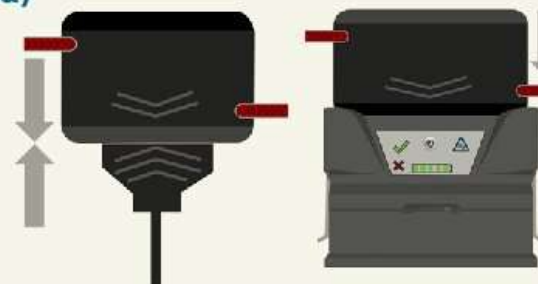

3

Примітка. Цей КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА НЕ містить усіх вказівок, як в інструкції з використання. Тому, будь ласка, зверніться до інструкції з використання для отримання повних вказівок щодо експлуатації вашого пристрою Warrior!

Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до всієї відповідної інформації (примітка: під час першого входу в систему може знадобитися авторизація) або зв'яжіться з нами за адресою info@qinflow.com



WARRIOR LITE

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ПОВІДОМЛЕНЬ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

(примітка: **ЧЕРВОНИЙ** колір вказує на те, що дія обов'язкова)



Нагрівання до встановленої температури; переконайтеся, що існує потік



Досягнуто заданої температури



Швидкість потоку перевищує ємність акумулятора. Розгляньте можливість зменшення швидкості потоку



Низький заряд акумулятора. Акумулятор Extra Power все ще має значний об'єм. Продовжуйте використання пристрою. **Замініть акумулятор, коли його заряд критично низький** (всі смуги блимають)

Немає потоку

БВІ не контролює потік; отже, він не може зупинити потік. Якщо застосовується тільки гравітаційна подача, може знадобитися 30-60 секунд, щоб заправити БВІ еритроцитами або цільною кров'ю. Розгляньте можливість використання напірної або ручної помпи, щоб прискорити процес.

Витік

Замініть БВІ; зменште зусилля, якщо працюєте з ручними інфузійними пристроями; повідомте QinFlow.



Потрібне усунення несправностей

1

Вимкніть пристрій (натисніть і потримайте кнопку ввімкнення/вимкнення), відрегулюйте ускладнення потоку, переконайтеся, що БВІ заправлений, і повторно активуйте пристрій (натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення).

Якщо проблему не вирішено:

2

Вимкніть пристрій і замініть БВІ повністю заправленим пристроєм. Блок має запускатися автоматично після підключення БВІ; якщо ні, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.

Немає відображення

1

Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення

Якщо проблему не вирішено:

2

Замініть акумулятор

Якщо проблему не вирішено:

3

Замінити БВІ



Не використовуйте пристрій, якщо дисплей пошкоджено

Не вдається вирішити проблему? Швидко вирішення більшості проблем полягає в тому, щоб виправити ускладнення потоку й замінити БВІ. Якщо проблему все ще не вирішено, навіть після перегляду інструкції з використання, напишіть нам на адресу info@qinflow.com або відкрийте запит на підтримку на нашому вебсайті (QinFlow.com >> Послуги та підтримка >> Відкрити запит на підтримку) on our website (QinFlow.com >> Services & Support >> Open Support Ticket)



ЛІНІЙКА ВИРОБІВ WARRIOR

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ПОВІДОМЛЕНЬ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВН

(примітка: **ЧЕРВОНИЙ** колір вказує на те, що дія обов'язкова)

ПОВІДОМЛЕННЯ «CONNECT THE DU» (ПІДКЛЮЧИТЬ ПРИСТРІЙ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ)

Підключіть БВІ. Замініть БВІ, якщо повідомлення не зникає.

ПОВІДОМЛЕННЯ «MALFUNCTION» (НЕСПРАВНІСТЬ)

- 1 Вимкніть пристрій, переконайтеся, що БВІ заправлений, а тоді повторно активуйте пристрій.
Якщо проблему не вирішено:
- 2 Замініть БВІ на повністю заправлений. Повторно активуйте пристрій.

ПОВІДОМЛЕННЯ «SYSTEM ERROR» (СИСТЕМНА ПОМИЛКА)

- 1 Вимкніть і знову ввімкніть пристрій
Якщо проблему не вирішено:
- 2 Замініть БВІ на повністю заправлений. Повторно активуйте пристрій.

НЕМАЄ РК-ДИСПЛЕЯ / ЧАСТКОВИЙ РК-ДИСПЛЕЙ

Замініть акумулятор, якщо не працює дисплей.

Не використовуйте пристрій, якщо дисплей пошкоджено, навіть незначно

ВИТІК БВІ

Замініть БВІ; зменште зусилля, якщо працюєте з ручними інфузійними помпами; повідомте про це QinFlow.

ПОВІДОМЛЕННЯ «HEATING» (НАГРІВАННЯ)

Наразі система нагріває рідину; не потрібно виконувати жодних дій.

ПОВІДОМЛЕННЯ «CHANGE IN FLOW» (ЗМІНА ПОТОКУ)

- Виявлено зміну потоку. Це повідомлення з'являтиметься часто, особливо при використанні пристроїв з переривчастим потоком або застосуванні низьких потоків технічного обслуговування.
- Жодних дій не потрібно, якщо потік видно в камері пристрою для краплинного вливання. В іншому випадку виправте переривання потоку (наприклад, перевірте, чи немає перегинів проводу).

ПОВІДОМЛЕННЯ «FLUID IS HOT» (ГАРЯЧА РІДИНА)

- Як правило, жодних дій не потрібно; система відновиться автоматично. Замініть БВІ, якщо повідомлення не зникає.

ТЕМПЕРАТУРА НА ВИХОДІ НИЖЧЕ ВСТАНОВЛЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

- Переконайтеся, що температура рідини, що надходить, нижче 30 градусів за Цельсієм
- Для холодної рідини це вказує на те, що швидкість потоку перевищує можливості нагрівання пристрою. Розгляньте можливість зменшення швидкості потоку.

ПОВІДОМЛЕННЯ «BATTERY LOW» (НИЗЬКИЙ ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРА)

Ще зберігається значний об'єм. Продовжуйте використання пристрою. Коли з'явиться повідомлення «Battery Empty» (Заряд акумулятора вичерпано) відкрийте бічні фіксатори й замініть акумулятор.

НЕМАЄ ПОТОКУ

БВІ не контролює потік; отже, він не може зупинити потік. Якщо застосовується тільки гравітаційна подача, може знадобитися 30-60 секунд, щоб заправити БВІ еритроцитами або цільною кров'ю.

Тому розгляньте можливість використання пакета для натискання або ручної помпи, щоб прискорити процес.