

CLS
TCCCСМС
ТСССCPP
TCCC

ВУЗЛОВИЙ ТУРНИКЕТ COMBAT READY CLAMP (CROC)

ПРИМІТКА: Вузлові турнікети мають застосовуватись після належного тампонування рани.



Подбайте про засоби індивідуального захисту

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

01

РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі

ПРИМІТКА: Можливо, вам буде потрібно зрізати одяг, щоб належним чином відкрити доступ до рани



02

За можливості, **ЗАСТОСУЙТЕ** прямий тиск на джерело найбільш активної кровотечі.



03

ВИЙМІТЬ все з кишень пораненого та приберіть всі речі з ділянки таза



04

ПОКЛАДІТЬ пораненого на спину

05

Утримуйте прямий тиск на рану під час підготовки вузлового турнікету CROC до застосування



06

Дістаньте з упаковки та зберіть вузловий турнікет CROC



07

ПІДНІМАЙТЕ вертикальну ручку вгору, поки вона не зафіксується, одночасно обертаючи її на 90 градусів, доки не спрацює блокування.



08

ПОТЯГНІТЬ вгору за вертикальний фіксатор (утримуючий штифт) та приєднайте горизонтальну ручку. Відпустіть утримуючий штифт та введіть горизонтальну ручку, доки не спрацює блокування.



09

ВСТАВТЕ Т-подібну ручку в горизонтальну ручку та повертайте за годинниковою стрілкою, доки вона не стабілізується, а її кінець не виглядатиме знизу горизонтальної ручки.



10

МІЦНО ПРИТИСНІТЬ диск для створення тиску до Т-подібної ручки, доки диск не зафіксується, клацнувши, на місці.



11

Визначте точне місце, до якого слід прикласти тиск:

а. На місце пальпації пульсу на стегні, одразу під паховою зв'язкою


ПРИМІТКА: Якщо попередньо не було проведено тампонування рани - використайте бинт або гемостатичну пов'язку, якщо ви збираєтесь розташувати диск для створення тиску над відкритою ранною

б. Трохи нижче середини уявної лінії між верхньою передньою клубовою остю та лобковим горбком (якщо пульс не пальпується)


Продовження на наступній сторінці...

ВУЗЛОВИЙ ТУРНИКЕТ CROC


продовження...

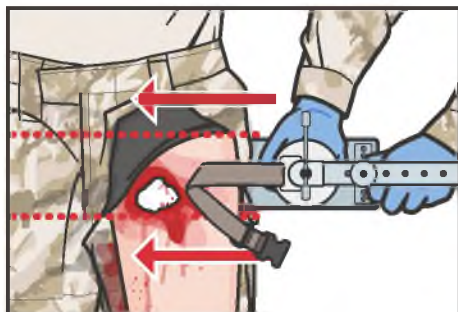

12 РОЗТАШУЙТЕ опорну пластину під пораненим, під потрібною точкою тиску.
ПРИМІТКА: За можливості, проведіть ремінь опорної пластини під сідницями/тазом пораненого для подальшого використання.

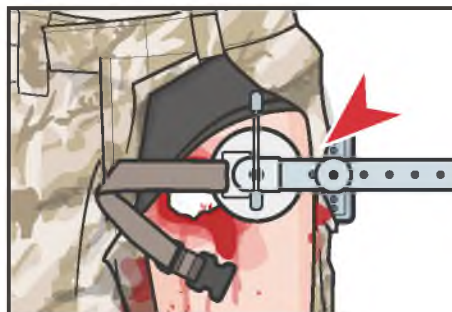

13 ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, щоб вертикальна ручка торкалася пораненого зі сторони поранення в безпосередній близькості до місця рани.

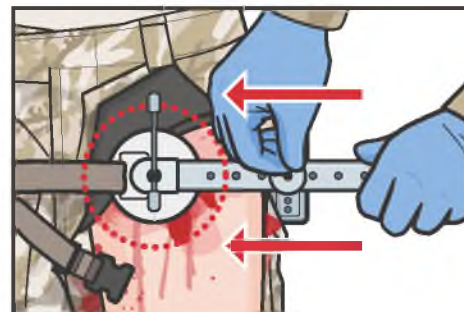

14 ВІДРЕГУЛЮЙТЕ горизонтальну ручку в положення над точкою тиску на місце пальпації пульсу на стегні (стегнову артерію).



15 ВІДРЕГУЛЮЙТЕ вертикальну ручку, зміщуючи її донизу так, щоб переконатися, що головка диска торкається пораненого.



16 ЗАСТОСУЙТЕ ТИСК на пов'язку, повертаючи Т-подібну ручку за годинниковою стрілкою. Обертайте ручку, доки кровотеча не зупиниться.



17 Приєднайте фіксуючий ремінь.
ПРИМІТКА: Слідкуйте за місцем кровотечі та за необхідності регулюйте пристрій

ПРИМІТКА. Якщо зупинка кровотечі не досягається за 20 повних обертів пристрою, розгляньте такий варіант, як відкрутити доверху та відрегулювати положення головки диска.



18 Запишіть час накладання турнікету на лобі в пораненого



19 Задokumentуйте результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого