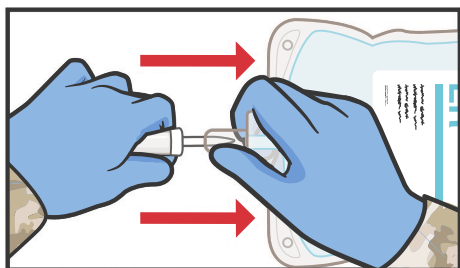
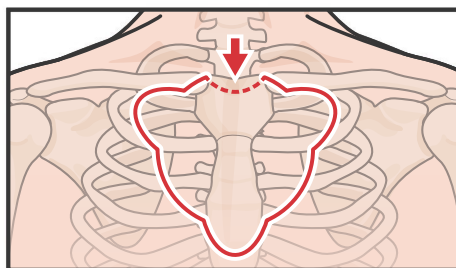
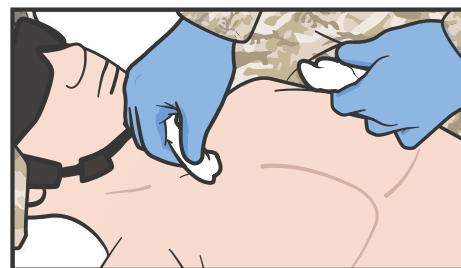
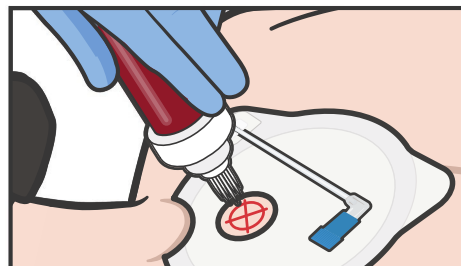
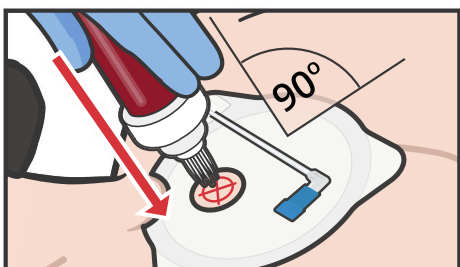
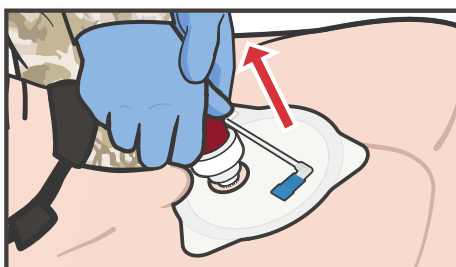
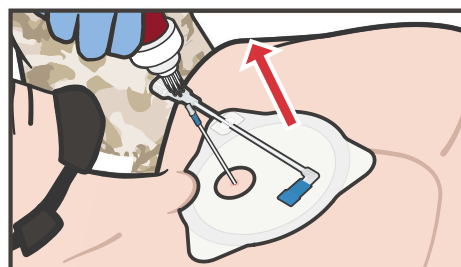
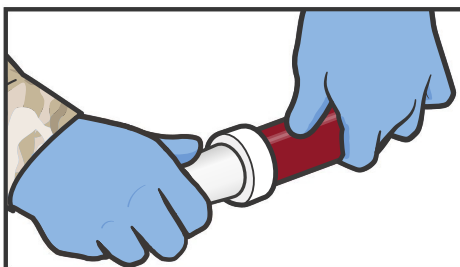
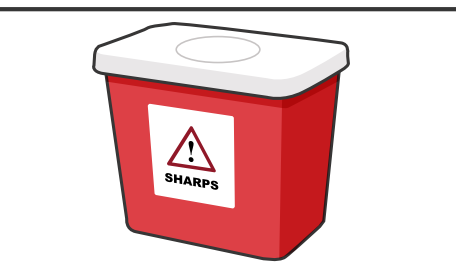


CLS
TCCCCMC
TCCCCPP
TCCC

FAST1®IO

**ПОДБАЙТЕ** про засоби індивідуального захисту.**ПРИМІТКА:** Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.**02** ПІД'ЄДНАЙТЕ контейнер/пакет з розчином для внутрішньовенної (ВВ) інфузії до належно підготовленої системи для ВВ інфузії.**03****04****05****06****07** FAST1**08****09****10****11****12**


CLS
TCCC

CMC
TCCC


GPP
TCCC

FAST1®IO

...

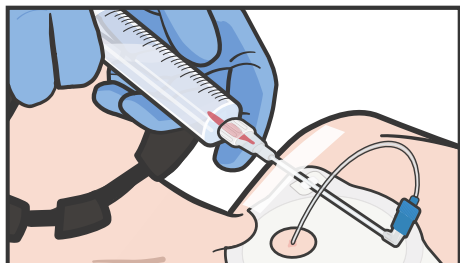


13

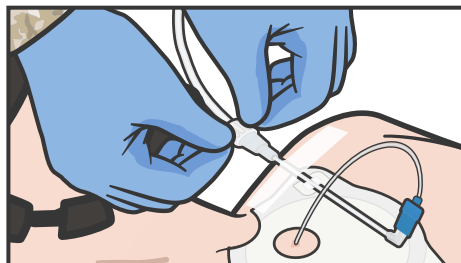


14



15

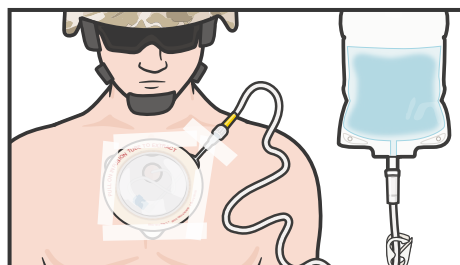

16

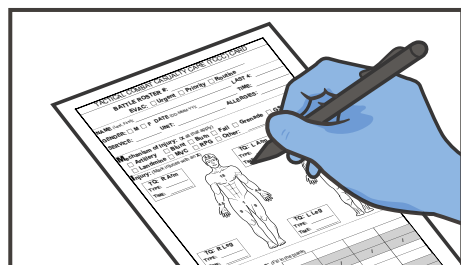

17

DD 1380