

# ВУЗЛОВИЙ ТУРНИКЕТ JETT (JUNCTIONAL EMERGENCY TREATMENT TOOL)

**ПРИМІТКА:** Вузлові турнікети повинні накладатися після належного тампонування рани.



**ПОДБАЙТЕ** про засоби індивідуального захисту.

**ПРИМІТКА:** Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



01

**РОЗКРИЙТЕ** місце поранення та огляньте джерело кровотечі.

**ПРИМІТКА:** Можливо, вам буде потрібно зрізати одяг, щоб належним чином відкрити доступ до рани.




02

Якщо це можливо, **ЗАСТОСУЙТЕ** прямий тиск на джерело найбільш активної кровотечі.

03

**ВИЙМІТЬ** все з кишень пораненого та приберіть всі речі з ділянки таза.

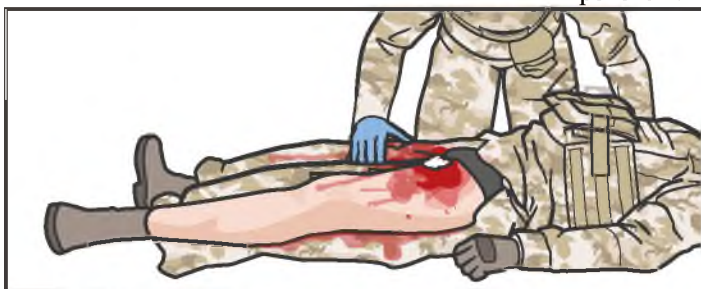

04

**ПОКЛАДІТЬ** пораненого в положення лежачи на спині.


05

**ЗАСТОСУЙТЕ** прямий тиск на місце пальпації пульсу на стегні.

06

**ВІДКРИЙТЕ** та **РОЗКРУТІТЬ** пристрій і підготуйте його до застосування.

**ПРИМІТКА:** Переконайтеся, що етикетка з написом «Цією стороною до пораненого» спрямована догори і до пораненого.

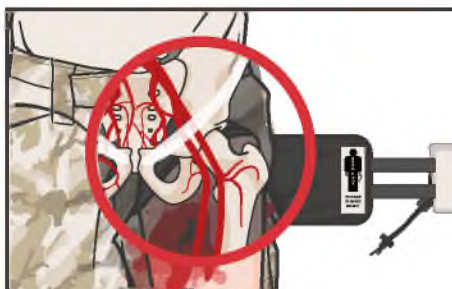

07

**ПРОСУНЬТЕ** ремінь під попереk або сідниці пораненого.

08

**ЗНАЙДІТЬ** пульс на стегні, безпосередньо під паховою зв'язкою, яка йде від верхнього гребеня клубової кістки до лобкової кістки, щоб правильно розташувати пристрій.

09

**ВИКОРИСТОВУЮЧИ** рухи вперед-назад, просуньте ремінь під сідниці так, щоб сіднична підкладка розташувалася під постраждалим, дозволяючи розмістити накладку для створення тиску трохи нижче пахвинної зв'язки.

Продовження на наступній сторінці...

# ВУЗЛОВИЙ ТУРНИКЕТ JETT (JUNCTIONAL EMERGENCY TREATMENT TOOL)

Продовження...



- 10** **ВІДРЕГУЛЮЙТЕ** дві вузлові накладки для створення тиску на ремінцях так, щоб вони розташувалися над місцем пальпації пульсу на стегні відразу під паховою зв'язкою.



- 11** **РОЗТАШУЙТЕ** вузлові накладки для створення тиску так, щоб їх довга вісь була на одній лінії (тобто паралельно) з паховим каналом або жолобом (дистальна частина підкладки буде спрямована дещо вбік приблизно під кутом 30 градусів), переконавшись, щоб статеві органи постраждалого не були в зоні стиснення турнікетом.



- 12** **ВСТАВТЕ** два кінці пряжки один в один, ви повинні почути характерне клацання.



- 13** **ПОТЯГНІТЬ** вільний кінець ремінця за допомогою ручки петлі, щоб затягнути пристрій і усунути усі провисання.

**ПРИМІТКА:** Однією рукою утримуйте ремінь, поки іншою затягуєте його.




- 14** **ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ** розташування накладок для створення тиску, щоб переконатися в їх правильному положенні над місцем пальпації пульсу на стегні, нижче і паралельно (кут 30°) до пахової зв'язки.



- 15** **ЗАТЯГНІТЬ** Т-подібну ручку на стороні пошкодження, повертаючи її за годинниковою стрілкою, а іншою рукою утримуйте опорну пластину, доки кровотеча не зупиниться.

**ПРИМІТКА:** Якщо кінцівка ціла, переконайтеся, що дистальний пульс відсутній.

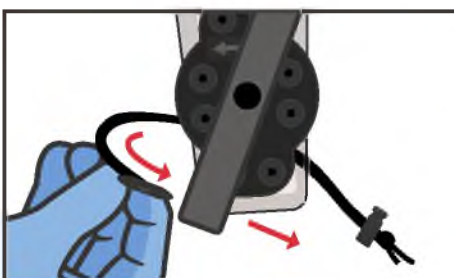

- 16** **ВСТАВТЕ** затискач в отвір на Т-подібній ручці та міцно затягніть його на опорній пластині, щоб зафіксувати пристрій.

**ПРИМІТКА ДО КРОКУ 16:** Якщо наявні двосторонні вузлові кровотечі, повторіть ту саму процедуру на іншій стороні.



- 17** **ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ** час накладання на відповідному для цього місці на ручці петлі.

**ПРИМІТКА ДО КРОКУ 16:** Часто перевіряйте стан постраждалого під час переміщення та транспортування, аби відслідковувати, чи залишається пристрій правильно розташованим, та, за потреби, відкоригувати його розташування для підтримки контролю кровотечі.



- 18** **ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ** результати огляду та надану допомогу в Картіці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.