




ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боець-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

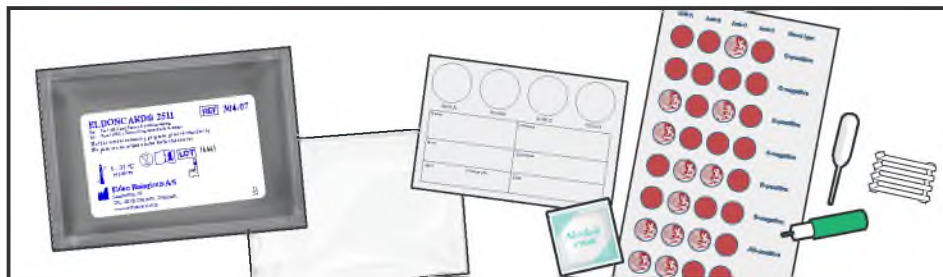


01 ПІДГОТУЙТЕ НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ:

(а) Джерело води (наприклад, фляга з водою);
(б) Набір для визначення групи крові (наприклад, EldonCard): ланцет, спиртова серветка, піпетка, інструкція (таблиця EldonCard), палички для забору та переносу крові (4 або більше) та захисна плівка;
(с) відповідні засоби індивідуального захисту (наприклад, рукавички).


02 ПЕРЕВІРТЕ, чи має картка для визначення групи крові/ набір EldonCard належний:

(а) Зовнішній вигляд
(б) Строк придатності
(с) Вміст

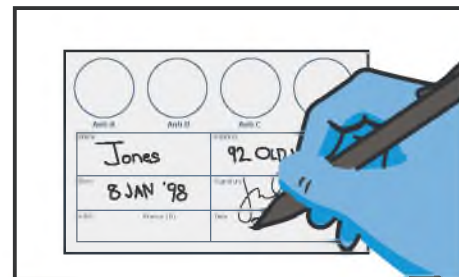

03 ЗАПИШІТЬ на картці дані донора та/або реципієнта:

(а) Ім'я (б) Адресу проживання
(с) Дату народження
(д) Дату проведення тестування
(е) Підпис донора/реципієнта

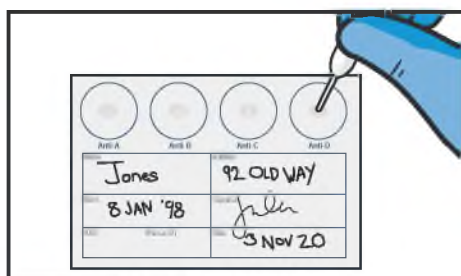


04 ВІЗЬМІТЬ піпетку та наповніть її водою.


05 ДОДАЙТЕ по одній краплі води до кожної лунки на картці.




06 ПРОДЕЗИНФІКУЙТЕ подушечку пальця донора/реципієнта (краще на недомінуючій руці) за допомогою спиртової серветки.

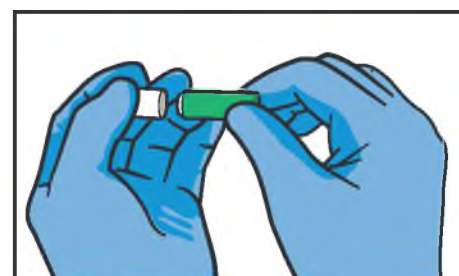


07 ВІДКРИЙТЕ ланцет, відкритивши захисний ковпачок.

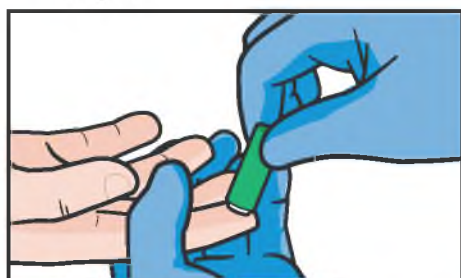

08 Для взяття крові МІЦНО ПРИТІСНІТЬ ланцет до подушечки пальця донора/реципієнта, проколуючи, щоб виступила кров, після чого викиньте ланцет у контейнер для утилізації гострих предметів.

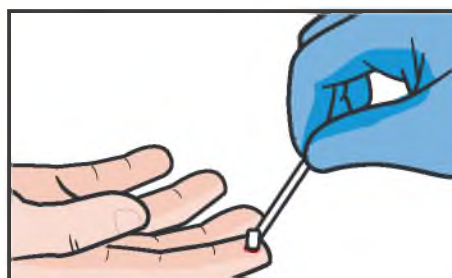

09 СТИСНІТЬ ПОДУШЕЧКУ ПАЛЬЦЯ в місці проколу, використайте одну з паличок для забору невеликої кількості крові донора.

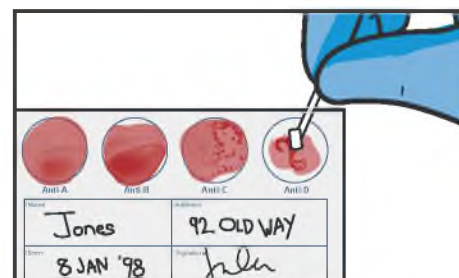

10 ПОМІСТІТЬ кров із палички в першу лунку на картці. Змішайте кров з краплею води, розподіляючи її по всій площині лунки.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Змішуйте приблизно 10 секунд.


ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Повторіть кроки 9-10 тричі, по одному разу для кожної лунки на картці.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Щоразу використовуйте нову паличку для кожної лунки. Не використовуйте палички повторно, бо це призведе до неправильних результатів тесту через змішування реагентів, що є на картці та мають знаходитись у відповідних окремих лунках.



ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Продовження...

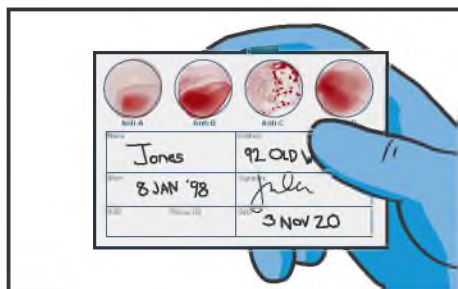

- 11** **ОБЕРЕЖНО НАХИЛЯЙТЕ КАРТКУ** на 4 сторони, тримаючи впродовж 10 секунд на кожній стороні (в загальному - 40 с), щоб стимулювати процеси змішування/ аглютинації.




- 12** Після використання усіх чотирьох паличок та змішування крові з реагентами на картці, **ВІЗЬМІТЬ** таблицю відповідності груп крові.




- 13** **ПОРІВНЯЙТЕ** усі чотири лунки (анти-А, анти-В, анти-Д та контрольну лунку) з таблицею, що входить до складу набору, оцінюючи наявність або відсутність аглютинації.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Намагайтеся оцінити результати, поки картка все ще волога.


ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Аглютинація має бути завжди відсутня в контрольній лунці, інакше тест є недійсним. Якщо аглютинація в лунках на картці співпадає зі зразком недійсного результату, тест необхідно провести повторно, використовуючи новий набір.

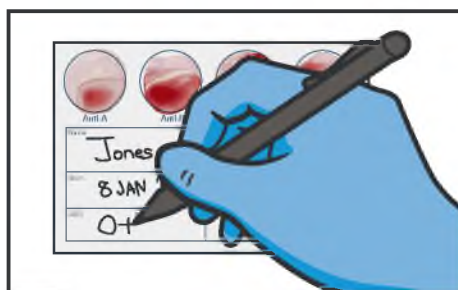

- 14** **ЗАПИШИТЬ** на картці групу крові за системою АВО та резус фактор.

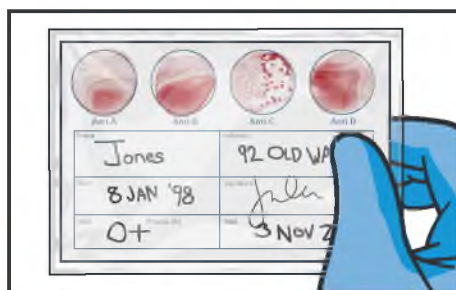

- 15** **РОЗМІСТІТЬ** захисну плівку поверх використаної картки та переконайтеся, що її прикріплено до Картки пораненого Форма DD 1380.

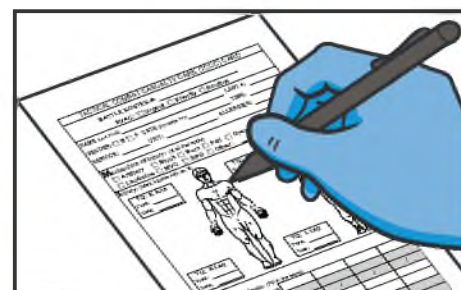

- 16** **ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ** результати у Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого (якщо це можливо).