

CLS TCCC

СМС

ТССС

CPP TCCC

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН

ПРИМІТКА: Пристрій для закриття ран можна використовувати в поєднанні з іншими методами зупинки кровотечі, а саме:

- Тампонування рани: Якщо необхідно, тампонування рани може бути виконане до того, як на рану буде накладено пристрій для закриття ран.
- Гемостатичні засоби: пристрій для закриття ран можна накладати на рану, яка була попередньо тампонована кровоспинним засобом. Гемостатичний засіб в такому випадку виймати не потрібно.
- Перев'язка або биндаж: за бажанням можна накласти додатковий компресійний биндаж чи пов'язку на пристрій для закриття ран після його накладання на рану. Це захистить пристрій і зможе забезпечити додатковий тиск на рану, зменшуючи ймовірність утворення гематоми.



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.


01

РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.

ПРИМІТКА: Можливо, вам буде потрібно зрізати одяг, щоб належним чином відкрити доступ до рани.


02

Якщо можливо, **ЗАСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК** на джерело найбільш активної кровотечі.

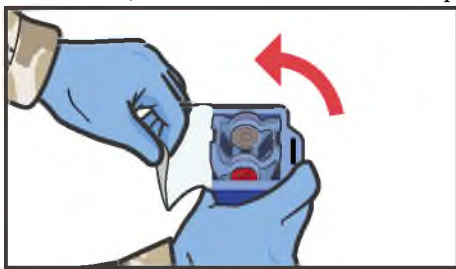


03

ВІДКРИЙТЕ стерильну упаковку, відклеївши один або обидва краї на верхній частині упаковки.

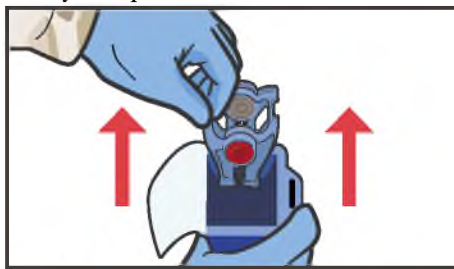


04

Одною рукою **ВИЙМІТЬ** пристрій для закриття ран з упаковки, піднявши його прямо вверх.

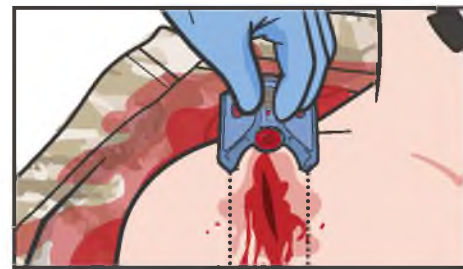


05

РОЗТАШУЙТЕ кінці голок пристрою для закриття ран паралельно (вздовж) країв рани.

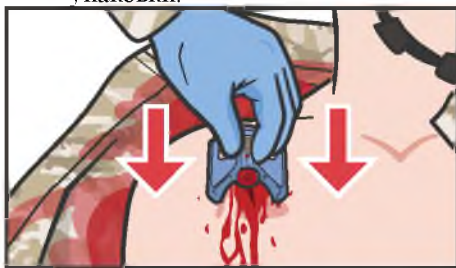

06

РОЗТАШУЙТЕ голки приблизно на відстані 1-2 см від країв рани з обох боків.

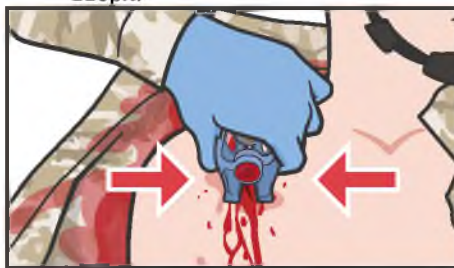

07


АКУРАТНО ВСТАВТЕ голки і закрийте пристрій, стиснувши його ручки та наблизивши їх одна до одної.

ПРИМІТКА: Пломба пристрою зруйнується одразу ж після стиснення його ручок.




08

ПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ пристрій автоматично заблокується на місці (ручки пристрою забезпечать непроникне для рідини закриття рани).

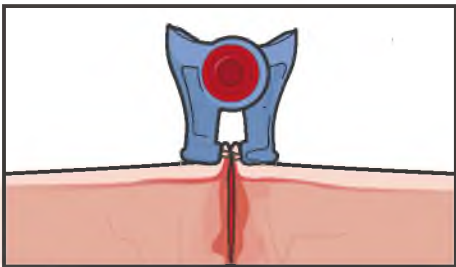

09

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що рана щільно закрита, на шкірі немає проміжків, а кровотеча не продовжується.

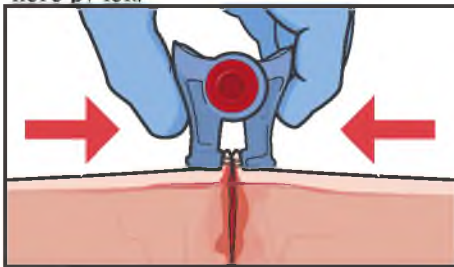

10

Якщо кровотеча продовжується: щільніше **ЗАФІКСУЙТЕ** пристрій; зніміть його, поміняйте розташування і повторно накладіть пристрій; застосуйте більше, ніж один пристрій; або затампунуйте рану гемостатичним бинтом чи XSTAT®, а потім повторно накладіть пристрій.



11

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.




УВАГА: Не використовуйте в ділянці очей.




ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН

Як знімати...

ПРИМІТКА: Щоб відкрити пристрій для закриття ран, потрібно використати кнопки розблокування з обох боків пристрою.

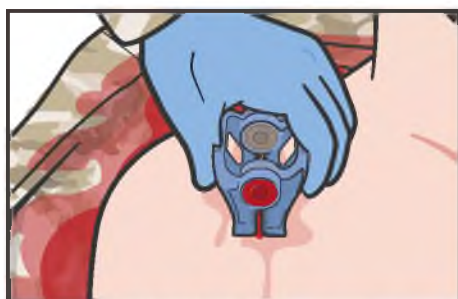


01 **ВІЗЬМІТЬСЯ** за верхні ручки пристрою однією рукою.

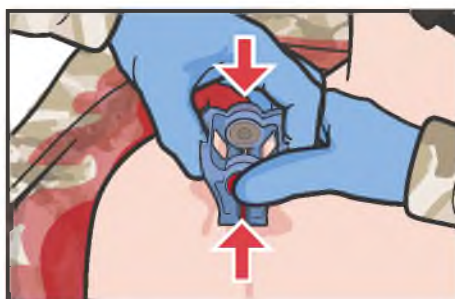


02 **НАТИСНІТЬ** на червоні кнопки з боків затискача, щоб розблокувати замикаючий механізм, потім стисніть верхні ручки пристрою разом, щоб відкрити його.

ПРИМІТКА: Цей процес виконується за допомогою двох рук.


ПРИМІТКА: Тримайте пристрій за кнопки під час зняття, аби мінімізувати випадковий контакт з голками.

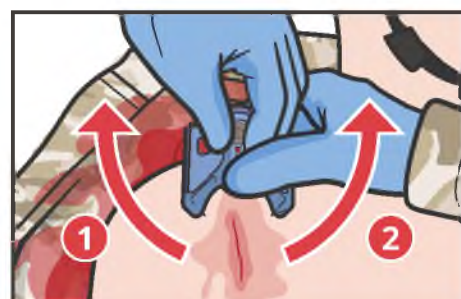


03 Утримуючи натиск на кнопки, **ПІДНІМІТЬ** один край затискача і **ВИТЯГНІТЬ** голки з одного краю рани. Потім витягніть голки з іншого боку рани. Одночасно можна витягнути голки лише з одного боку.

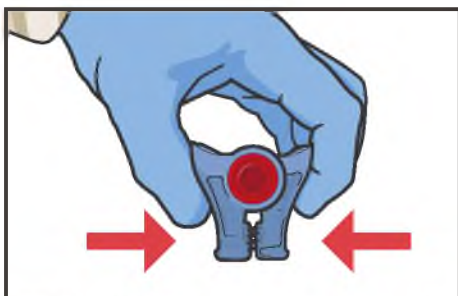

04 **ЗАКРИЙТЕ** пристрій, стиснувши нижні ручки до повного закриття, щоб запобігти випадковому пораненню його голками.

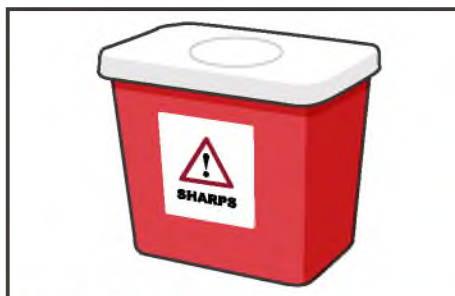

05 **УТИЛІЗУЙТЕ** пристрій відповідно до місцевих інструкцій щодо біологічно небезпечних гострих предметів.

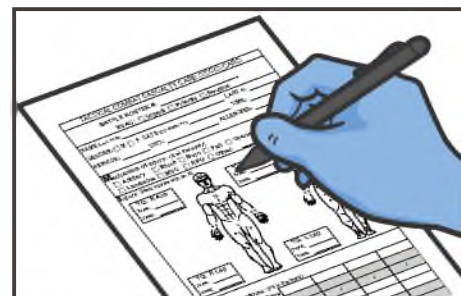

06 **ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ** результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.



УВАГА: Небезпечний гострий предмет - поведьтеся обережно, щоб уникнути травм.