

MOVES[®] SLC[™]

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК



Цей Короткий посібник з використання MOVES[®] SLC[™] призначений для додаткового навчання застосуванню MOVES[®] SLC[™] і не заміняє собою повної Інструкції з використання.

MOVES® SLC™

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ НА ШВЛ

КРОК перший

Підніміть фіксатор розблокування/блокування на дверцятах картриджа апарата ШВЛ на верхній передній частині MOVES® SLC™. Вставте картридж апарата ШВЛ, закрийте дверцята й заблокуйте їх, натиснувши на фіксатор.

ПРИМІТКА. Не знімайте прозору пластикову обмотку навколо картриджа апарата ШВЛ.



КРОК другий

Перевірте, чи встановлено вуглеводний фільтр на задній панелі MOVES® SLC™.



КРОК третій

Приєднайте вологовідділювач до порту «від пацієнта» на дверцятах картриджа апарата ШВЛ. Приєднайте шланги дихального контуру пацієнта до вологовідділювача й порту «до пацієнта» на дверцятах картриджа апарата ШВЛ. Приєднайте трубку з нафіону до пробовідбірної трубки.



КРОК четвертий

Якщо пацієнт на ШВЛ важить менше 30 кг або використовується дихальний об'єм менше 150 мл, замініть фільтр пацієнта на дихальному контурі апарата ШВЛ на дитячий фільтр пацієнта.

КРОК п'ятий

Приєднайте аспіраційну ємність і трубки до MOVES® SLC™.



КРОК шостий

Приєднайте усі необхідні моніторингові прилади пацієнта до MOVES® SLC™. **ПОКИ ЩО НЕ ПРИЄДНУЙТЕ АПАРАТ ДО ПАЦІЄНТА.**

Крок сьомий

Перевірте рівень заряду акумулятора MOVES® SLC™ і встановіть акумулятори.



КРОК восьмий

Приєднайте джерело живлення/зарядний пристрій MOVES® SLC™ до MOVES® SLC™, якщо акумулятор потрібно зарядити і/або якщо необхідно підключити MOVES® SLC™ до електромережі.



ПРИМІТКА. Для роботи MOVES® SLC™ потребує або встановлення двох акумуляторів, або одного акумулятора й підключення до джерела живлення/зарядного пристрою та електромережі.


КРОК дев'ятий

Увімкніть MOVES® SLC™, натиснувши кнопку живлення на задній панелі.




КРОК десятий

Керуючись підказками, користувач може змінити конфігурацію MOVES® SLC™ для нового пацієнта і повернути налаштування пристрою до стандартних параметрів, обравши варіант YES (ТАК). Оберіть варіант NO (НІ), щоб зберегти раніше використані налаштування.

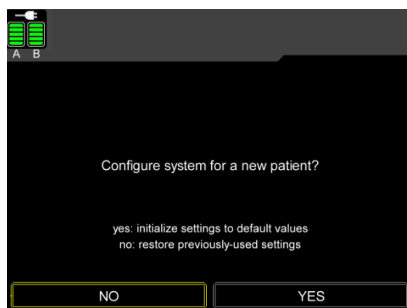

Крок одинадцятий

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб виконати тестування системи. Після успішного виконання усіх тестів оберіть CONTINUE (ПРОДОВЖИТИ).

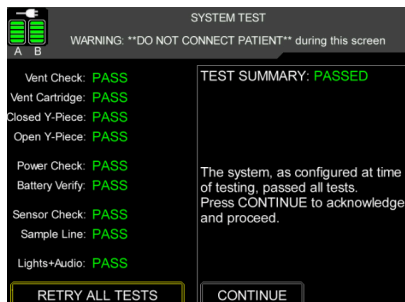


КРОК дванадцятий

MOVES® SLC™ перейде до меню Setup (Налаштування) і запуститься у режимі Monitor Only (Лише монітор).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Система не виконує вентиляцію у режимах Monitor Only (Лише монітор) або O₂ Supplement (Киснева підтримка). Переведення системи у ці режими зупиняє вентиляцію.

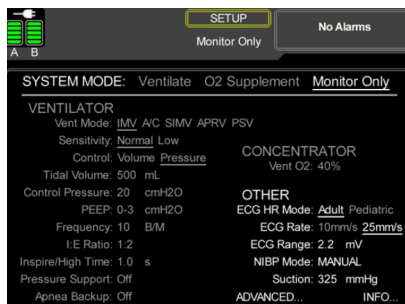


КРОК тринадцятий

Змініть усі потрібні параметри в меню Setup (Налаштування), перш ніж починати штучну вентиляцію легень пацієнта. Також слід приєднати потрібні кабелі моніторингу до пацієнта.

ПРИМІТКА. Параметри вентиляції та інші параметри можна змінювати, навіть коли система перебуває в режимі Monitor Only (Лише монітор).

КРОК чотирнадцятий

Підключіть дихальний контур апарата ШВЛ до пацієнта. Змініть режим системи на Ventilate (Вентиляція). Вентиляція почнеться із заданими налаштуваннями.

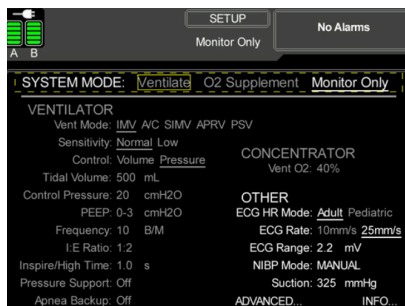

Заміна картриджа апарата ШВЛ під час експлуатації

Якщо спрацює сигнал MOVES® SLC™ для оператора про потребу заміни картриджа апарата ШВЛ, зробіть наступне.

- Вийміть новий картридж апарата ШВЛ з упаковки, перш ніж вносити зміни у систему.
- Перейдіть в меню Setup (Налаштування) і переведіть систему в режим Monitor Only (Лише монітор), щоб зупинити вентиляцію.
- Від'єднайте вологовідділювач від порту «від пацієнта» і дочекайтеся відкриття дверцят картриджа апарата ШВЛ.
- Відкрийте дверцята картриджа апарата ШВЛ і вийміть використаний картридж апарата ШВЛ.
- Вставте новий картридж апарата ШВЛ, закрийте й заблокуйте дверцята картриджа апарата ШВЛ.
- Знову приєднайте вологовідділювач до дверцят картриджа апарата ШВЛ і перевірте, чи приєднані шланги дихального контуру пацієнта на апараті ШВЛ.
- Переведіть систему назад в режим Ventilate (Вентиляція), щоб негайно відновити вентиляцію пацієнта.

Інтерфейс системи MOVES® SLC™

Після завершення тестів системи MOVES® SLC™ можуть відобразитися наступні екрани:

- **SETUP** (Налаштування): перегляд і зміна основних робочих параметрів системи MOVES® SLC™;
- **MAIN** (Основне): відображає статус пацієнта і фізіологічні та системні параметри, які відстежуються;
- **EKG**(ЕКГ): перегляд усіх 12 відведень ЕКГ одночасно;
- **ALARM LIMITS** (Граничні значення для сповіщення): перегляд і зміна граничних значень фізіологічних і системних параметрів сповіщення;
- **ALARM ON/OFF** (УВІМК./ВИМК. сповіщення): перегляд стану сповіщення системи й увімкнення/вимкнення окремих параметрів сповіщення;
- **SYSTEM TEST** (Тестування системи): перегляд стану завершених системних тестів.

THORNHILL
MEDICAL
Inspiring Innovation