


ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.
ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

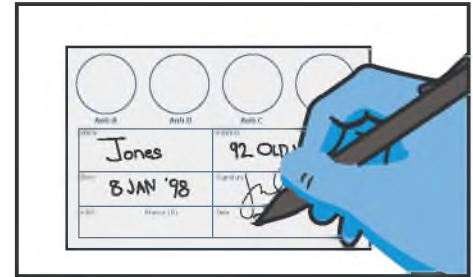

01 ПІДГОТУЙТЕ НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ:


(а) Джерело води (наприклад, фляга з водою);
(б) Набір для визначення групи крові (наприклад, EldonCard): ланцет, спиртова серветка, пшетка, інструкція (таблиця EldonCard), палички для забору та переносу крові (4 або більше) та захисна плівка;
(с) відповідні засоби індивідуального захисту (наприклад, рукавички).

02 ПЕРЕВІРТЕ, чи має картка для визначення групи крові/ набір EldonCard належний:

(а) Зовнішній вигляд
(б) Строк придатності
(с) Вміст

03 ЗАПИШІТЬ на картці дані донора та/або реципієнта:

(а) Ім'я (б) Адресу проживання
(с) Дату народження
(д) Дату проведення тестування
(е) Підпис донора/реципієнта

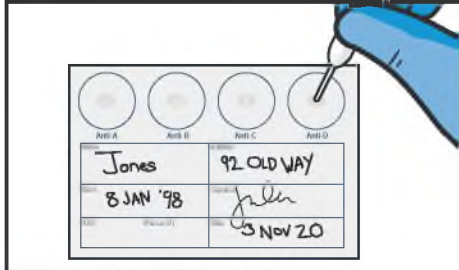

04 ВІЗЬМІТЬ піпетку та наповніть її водою.



06 ПРОДЕЗИНФІКУЙТЕ подушечку пальця донора/реципієнта (краще на недомінуючій руці) за допомогою спиртової серветки.




07 ВІДКРИЙТЕ ланцет, відкритивши захисний ковпачок.


05 ДОДАЙТЕ по одній краплі води до кожної лунки на картці.



08 Для взяття крові МІЦНО ПРИТІСНІТЬ ланцет до подушечки пальця донора/реципієнта, проколуючи, щоб виступила кров, після чого викиньте ланцет у контейнер для утилізації гострих предметів.

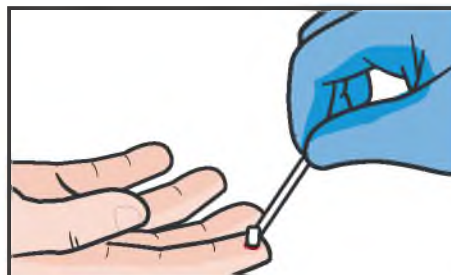

09 СТИСНІТЬ ПОДУШЕЧКУ ПАЛЬЦЯ в місці проколу, використайте одну з паличок для забору невеликої кількості крові донора.

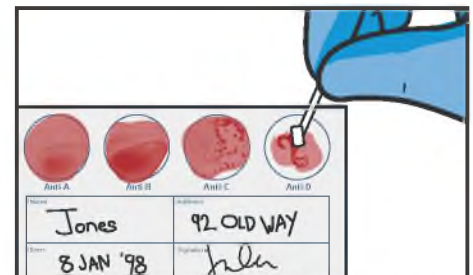

10 ПОМІСТІТЬ кров із палички в першу лунку на картці. Змішайте кров з краплею води, розподіляючи її по всій площині лунки.


ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Змішуйте приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Повторіть кроки 9-10 тричі, по одному разу для кожної лунки на картці.


ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Щоразу використовуйте нову паличку для кожної лунки. Не використовуйте палички повторно, бо це призведе до неправильних результатів тесту через змішування реагентів, що є на картці та мають знаходитись у відповідних окремих лунках.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Продовження...

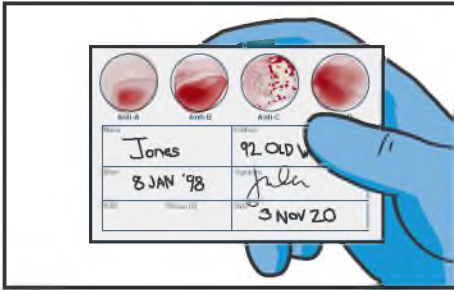

- 11** **ОБЕРЕЖНО НАХИЛЯЙТЕ КАРТКУ** на 4 сторони, тримаючи впродовж 10 секунд на кожній стороні (в загальному - 40 с), щоб стимулювати процеси змішування/ аглютинації.

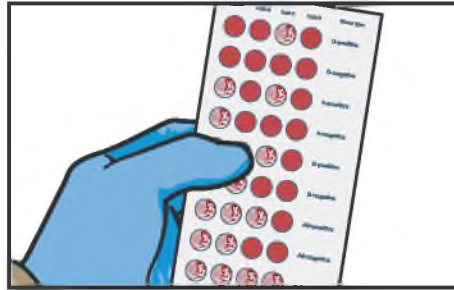


- 12** Після використання усіх чотирьох паличок та змішування крові з реагентами на картці, **ВІЗЬМІТЬ** таблицю відповідності груп крові.




- 13** **ПОРІВНЯЙТЕ** усі чотири лунки (анти-А, анти-В, анти-D та контрольну лунку) з таблицею, що входить до складу набору, оцінюючи наявність або відсутність аглютинації.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Намагайтеся оцінити результати, поки картка все ще волога.


ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Аглютинація має бути завжди відсутня в контрольній лунці, інакше тест є недійсним. Якщо аглютинація в лунках на картці співпадає зі зразком недійсного результату, тест необхідно провести повторно, використовуючи новий набір.

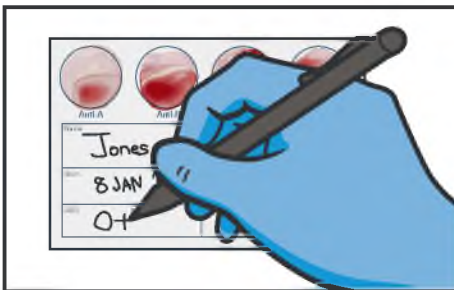

- 14** **ЗАПИШИТЬ** на картці групу крові за системою АВО та резус фактор.

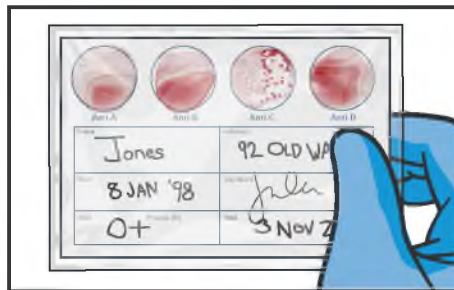

- 15** **РОЗМІСТІТЬ** захисну плівку поверх використаної картки та переконайтеся, що її прикріплено до Картки пораненого Форма DD 1380.

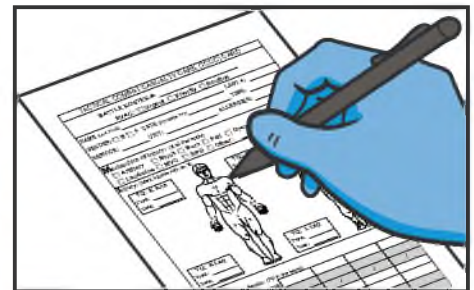

- 16** **ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ** результати у Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого (якщо це можливо).