

Інструкція до гемостатичного засобу XSTAT®



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: XSTAT не показаний для використання в ділянці грудної клітки, плевральній порожнині, середостінні, черевній порожнині, заочеревинному та крижовому просторі, вище пахової зв'язки та над ключицею.



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

01

РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.

ПРИМІТКА: Можливо, вам буде потрібно зрізати одяг, щоб належним чином відкрити доступ до рани.



02 **ЗАСТОСОВУЙТЕ** прямий тиск на рану, поки збираєте та готуєте аплікатор.



03 Під час використання XSTAT 30 **ТЯГНІТЬ** поршень назовні, допоки він не зупиниться і не заблокується.



04 **ВСТАВТЕ** кінчик аплікатора в рановий канал якомога ближче до джерела кровотечі.





05 **ВСТАВТЕ** поршень у пристрій, якщо використовуєте XSTAT 12.



06 **СИЛЬНО НАТИСНІТЬ** на ручку поршня, щоб ввести міні-спонжі у рановий канал чи порожнину.

ПРИМІТКА: Якщо є опір, злегка потягніть аплікатор на себе, щоб створити додатковий простір для тампонування, після чого продовжуйте натискати на ручку.

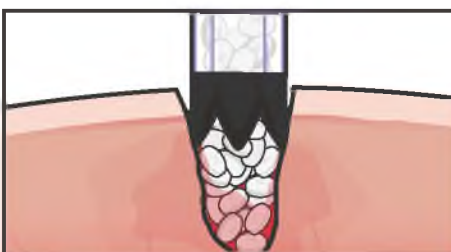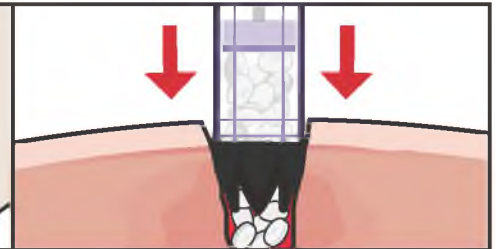

07 **ЗАТАМПОНУЙТЕ** рану міні-спонжами, використовуючи додаткові аплікатори за потреби.



08 **ЗАТАМПОНУЙТЕ** рану за допомогою XSTAT так само щільно, як би ви це робили за допомогою марлі (2,5-5 см над раною).

ПРИМІТКА: Чим щільніше розміщені спонжі, тим більший тиск вони спричиняють на пошкоджену судину.



09 **ЗАСТОСУЙТЕ** прямий тиск на рану за допомогою рук протягом 3 хв.

ПРИМІТКА: Ніколи не робіть спроб видалити міні-спонжі з рани.



10 **НАКЛАДІТЬ** на рану тиснучу пов'язку та спостерігайте, чи не відновлюється у пораненого кровотеча.



11 **ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ** результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.